



TAKTILES BIO- & NEUROFEEDBACK



Wo kann ich das Mindfield® MindPet bekommen?

Bestellen können Sie die Steuereinheit (wird nur einmalig pro Bio- oder Neurofeedback-Arbeitsplatz benötigt), die MindPets in verschiedenen Variationen und/oder die Vibrationskissen über unseren Onlineshop, unter www.mindfield-shop.com oder rufen Sie uns an unter 02565 / 406 27 27 für eine individuelle Beratung!

Sämtliches Zubehör, wie Batterien/Akkus für die Steuereinheit und für das Vibrationskissen, sind im Lieferumfang enthalten.



Unsere Partner



www.akademie-neurofeedback.de



A Better State of Mind



A Better State of Mind



Taktiler Bio- und Neurofeedback mit dem Mindfield® MindPet

Das MindPet ist ein Stofftier, welches einen Vibrationsmotor im Inneren enthält. Es ist in verschiedenen Varianten von Plüschtieren erhältlich. In Kombination mit den Mindfield Mastergeräten gibt es ein Vibrationsfeedback an den Probanden. Dieses Feedback ist je nach Trainingsbildschirm an das Erfüllen einer Bedingung geknüpft und reagiert unmittelbar.

Das taktile Feedback bietet eine passende Ergänzung zum audiovisuellen Feedback mittels Balken, Animationen, Videos und Musik innerhalb des Bio- und Neurofeedbacktrainings.

Als Alternative zu den MindPet Stofftieren bieten wir auch ein Vibrationskissen an. Dieses wird ebenso wie die MindPets an eine Steuereinheit angeschlossen und gibt den Probanden ein taktiler Feedback bei Erfüllung einer Trainingsbedingung.

An welche physiologischen Parameter kann ich das Mindfield® MindPet knüpfen?

Es ist möglich jeden beliebigen Parameter aus der Neurofeedback- und Biofeedback-Software zu verwenden. So können Sie zum Beispiel das MindPet als Belohnung vibrieren lassen, wenn im EEG der gewünschte mentale Zustand, wie eine Verringerung der Unaufmerksamkeit, erreicht wird oder während des Biofeedbacktrainings die Handtemperatur ansteigt. Auch eine ruhige Atmung, eine gute Herzratenvariabilität oder einen entspannten Muskeltonus können Sie auf diese Weise mit einer sanften Vibration belohnen. Die Vibration kann innerhalb des Biofeedbacktrainings auch als negatives Feedback eingesetzt werden.

Wie verwende ich das Mindfield® MindPet?

Das MindPet ist mit allen Mindfield Mastergeräten kompatibel, mit Ausnahme des MindMaster Neuro 4 (ehemals MindMaster EEG). Sie benötigen neben einem MindPet eine Steuereinheit, mit welcher Sie die Vibrationsstärke stufenlos regulieren können. Über Kabelverbindungen werden die Geräte (MindPet, Steuerungselement und Mindfield Mastergerät) miteinander verbunden, die Steuereinheit benötigt zusätzlich zwei Batterien/Akkus. An den Mindfield Master Geräten wird die Steuerungseinheit an der vorderen Puls-Buchse angeschlossen, innerhalb der Software müssen Sie das Vibrationsfeedback aktivieren.



A Better State of Mind